

JP HIGIÉNIAI ARCVÉDŐ PAJZS

Használati útmutató



Az arcvédő pajzs védelmet nyújt fröccsenő anyagok ellen. Légzésvédelmet nem biztosít viselője számára, így szájmazskkal együtt ajánlott alkalmazni. Az állítható pántoknak köszönhetően könnyen méretre állítható. Felhasználását javasoljuk: kiszolgáló személyzet részére benzinkutak, éttermek, pénztárak és közösségben folytatott munkavégzés esetén.

Jellemzők:

- teljes arcvédelem
- szemüveggel együtt is használható
- egyszerűen tisztítható és fertőtleníthető
- szárazon nem tisztítható
- termék közepesen karcérzékeny
- mindkét oldalán eltávolítandó védőfóliával van ellátva
- többször felhasználható
- nem minősül egyéni védőeszköznek (mechanikai és vegyi anyagok ellen nem nyújt védelmet)
- terméken gyártásból adódóan apró buborékok előfordulnak, ami nem akadályozza a zavartalan kilátást



Csomag tartalma:

1. • 1 db PET-G maszk
2. • 1 db tartókeret
3. • 2 db tépőzár
4. • 2 db öntapadós szivacs



Összeállítása 4 egyszerű lépésben

1. Távolítsa el az öntapadós szivacsról a fóliát, majd a tartókeret belső felületére ragassa fel mind a két csíkot.

2. A PET-G maszkról hajtsa le a fóliát a lyukaknál. A lyukakat illessze bele a tartókereten található kampókba úgy a kampók felfelé állnak. A középső kettővel kezdje. Tegye meg az illesztés mind a 4 kampó esetében. Távolítsa el a teljes fóliát.

3. A tartókeret végeinél található kampóra illessze rá a tépőzárakat, mind a jobb, mind a bal oldalon. Ügyeljen arra, hogy a tépőzárak ugyanaz a felülete legyen kívül.

4. Tegye a homlokához az összeállított arcvédő pajzsot, majd a tépőzárak segítségével rögzítse azt a megfelelő méretben.

Gyártja:
Jász-Plasztik Kft.

Jászberény, 5100 Necső telep 1.

Tel.: +36 57/413-413 | E-mail: jpakku@jp.hu | Web: www.jasz-plasztik.hu



videó:
arcvédő pajzs összeállítása
<https://jp.hu/arcvedopajzs>